

Netzwerkinstallation

ACHTUNG !!

Gilt nur bei Neuinstallation der Software – bei vorhandenen EKG-Aufzeichnungen ist eine nachträgliche Netzwerkinstallation so nicht möglich – die Daten werden zerstört !!!

PC-EKG Netzwerk

- 1) Installieren Sie die Software auf allen PCs (Server und Clients)
- 2) Auf dem Server muß ein entsprechendes Laufwerk eingerichtet und an die Clients freigegeben („gemapt“) werden
- 3) Nun wird auf allen client-Rechnern auf die EKG Datenbank, welche auf dem Server geführt wird, verwiesen. Gehen sie dazu wie folgt vor:
 - a) Suchen Sie auf der Festplatte **DES JEWELIGEN CLIENTS** im Verzeichnis Windows die Datei basic_v.ini.
 - b) Öffnen sie diese und nehmen folgende Änderungen vor:
 - ändern Sie den Laufwerksbuchstaben hinter „Data=“ und hinter „mereni=“ in den Laufwerksbuchstaben des Freigegebenen Laufwerks auf dem Server.
 - Z.b.: Wenn der Laufwerksbuchstabe der Serverfestplatte „Z“ heisst:
 - Data=Z:\Sitosprg
 - mereni=Z:\Sitosprg\data
 - Schließen sie das Editorfenster und speichern Sie die geänderte basic_v.ini

Diese Routine führen Sie auf allen Clients aus. Damit kann nun von allen Clients auf den Patientendatenbestand auf dem Server zurückgegriffen werden.