

Bedienungsanleitung Atemmonitor Ap-Alert

Bringen Sie den Sensor am Tracheotubus des Patienten an und stecken Sie den Stecker in den hinteren Teil des Gerätes.

Wählen Sie die Sensibilitäts-einstellung proportional zur Größe des Tieres (niedrig für große Hunde – hoch für kleine Hunde).

Schließen Sie das Ladegerät, wenn notwendig, an.

Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie den Schalter von der Stellung „OFF“ auf die gewünschte Alarmzeit ein.

Stellen Sie die Lautstärke ein. Wenn Sie die Sensibilität richtig eingestellt haben und bei normaler Atmung Alarm gegeben wird. Liegt das normalerweise an unzugänglichen Aufblasen der Tubusmanschette.

Da der Sensor auf die Wärme der ausgeatmeten Luft reagiert, kann es sein, dass bei einem unterkühlten Patienten kein Alarm ausgelöst wird.

Wenn die Sensibilität während einer langen Operation immer schwächer wird, ist es empfehlenswert, die Möglichkeit einer Unterkühlung einzubeziehen.

