



Checkliste

für die Reinigung & Aufbereitung chirurgischer Instrumente

zum Ausdrucken und Abhaken

- ☐ Organische Reste & korrosive Mittel entfernen.
- ☐ Instrumente bis zur Reinigung nicht eintrocknen lassen.
 - 1. Nassentsorgung: in eine Lösung mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel einlegen – Dauer beachten!
 - 2. Trockenentsorgung: mit nassem Tuch bedecken.
- ☐ Zur Reinigung Gelenke öffnen, Instrumente ggf. zerlegen.
- ☐ Einlegen in eine Lösung mit enzymatischem Reiniger mit Desinfektionswirkung.
- ☐ Manuelle Reinigung mit weicher Bürste unter fließendem Wasser.
- ☐ Schlusspülung mit vollentsalztem Wasser.
- ☐ Gründlich trocknen mit fusselfreiem Tuch, Druckluft.
- ☐ Gründliche Sichtkontrolle.
- ☐ Defekte und rostige Instrumente aussortieren.
- ☐ Pflege mit Spezial-Öl für Instrumente: gezielt auf Gelenke, Verschlüsse, Verschraubungen und Gleitflächen aufbringen.
- ☐ Geölte Stellen bewegen, um das Öl zu verteilen. Überschüssiges Öl abwischen.
- ☐ Auf Funktionsfähigkeit und Leichtgängigkeit prüfen.
- ☐ Verpackung für die Sterilisation, abgestimmt auf das Verfahren
- ☐ Beschriftung des Sterilguts mit allen wichtigen Informationen
- ☐ Sterilisatoren / Autoklaven sachgerecht befüllen, nicht überladen
- ☐ Sterilisierprogramm abgestimmt auf Art, Menge und Verpackung der Instrumente wählen
- ☐ Sterilgut vor Entnahme gut abkühlen lassen
- ☐ Lagerung unter Beachtung aller 5 Faktoren:
 - 1. Trocken, frei von Staub & Ungeziefer
 - 2. Bei normaler Raumtemperatur (ca. 20 °C)
 - 3. Nicht in der Nähe von Chemikalien / Nassquellen
 - 4. Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
 - 5. In einem geschlossenen Schrank

Notizen: