

Instrumentenaufbereitung

Benutzung

1

- Unsachgemäßen Einsatz und hektisches Abwerfen der Instrumente vermeiden
- Blut und Gewebe schon während der OP abwischen

Vorbereitung

2

- Organische Reste abwischen und korrosive Mittel entfernen
- Instrumente bis zur Reinigung nicht eintrocknen lassen
- Gegebenenfalls in Reinigungs- und Desinfektionsmittel einlegen oder mit nassem Tuch bedecken

Reinigung

3

- Instrumente zerlegen und Gelenke öffnen
- In Reinigungs- und Desinfektionsmittel einlegen
- Mit weicher Bürste unter fließendem Wasser gründlich, manuell reinigen
- Schlusspülung mit vollentsalztem Wasser vornehmen

Kontrolle

4

- Instrumente mit fusselfreiem Tuch und / oder Druckluft trocknen
- Gründliche Sichtkontrolle durchführen
- Defekte und rostige Instrumente aussortieren
- Gegebenenfalls EICKEMEYER® Reparatur-Service kontaktieren

Lagerung

8

- Sterile Instrumente an geschlossenem Ort, trocken, staub- und ungezieferfrei lagern
- Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalien oder Nassquellen schützen

Sterilisation

7

- Sterilisatoren / Autoklaven sachgerecht befüllen und nicht überladen
- Sterilisierprogramm auf Art, Menge und Verpackung der Instrumente abstimmen
- Beutel und Behälter vor Entnahme gut abkühlen und trocknen lassen

Verpackung

6

- Verpackung der Instrumente auf das angewandte Sterilisierverfahren abstimmen
- Sterilgut mit Inhalt, Sterisierdatum und Namenskürzel beschriften

Pflege

5

- Gezielt Gelenke, Verschlüsse, Verschraubungen und Gleitflächen mit Instrumentenspray besprühen
- Instrumente bewegen und überschüssiges Öl abwischen
- Auf Funktionsfähigkeit und Leichtgängigkeit prüfen