

STANDARD / DTE Scaler-Spitzen

Art. Nr. 176871 – 176874, 176878 / 17402401 – 17402405

Unterscheidung von Scaler-Spitzen für Zahnsteinentfernungsgeräte

Die Firma EICKEMEYER® vertreibt zwei verschiedene Sorten von Scaler-Spitzen, die **nicht untereinander kompatibel** sind. Durch die Verwendung einer falschen Scaler-Spitze wird das Gewinde am Handstück beschädigt und das Handstück muss ausgetauscht werden. Bitte achten Sie immer darauf, die richtigen Scaler-Spitzen zu benutzen.

STANDARD Scaler-Spitzen


- ▶ Für Handstück mit **rotem Ring**
- ▶ Für Profident PLUS Einbauscaler (17402319 – altes Modell bis 04/2021)
- ▶ Für EickSonic II Zahnsteinentfernungsgerät (176865)
- ▶ Kompatibel mit Woodpecker und EMS

176871 – 176874, 176878


DTE Scaler-Spitzen

- ▶ Für das Handstück mit **schwarzem Ring**
- ▶ Für Profident PLUS Einbauscaler (17402324 – neues Modell ab 04/2021)
- ▶ Die Spitzen haben einen Aufdruck DTE
- ▶ Kompatibel mit Satelek und NSK

17402401 – 17402405

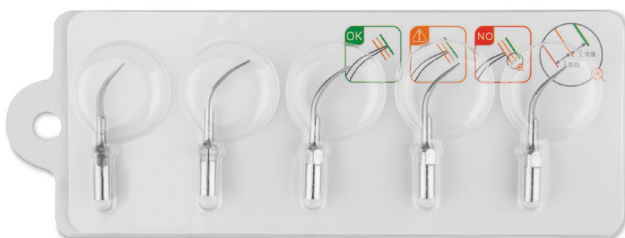

STANDARD Scaler-Spitzen

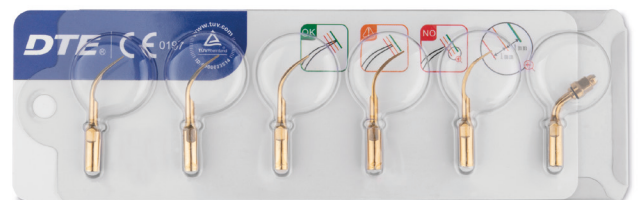

DTE Scaler-Spitzen