

DENTO-DORM® Tracheal-Sponge Kofferset

178260

Wie oft können die Tracheal-Sponges autoklaviert werden?

Mehrfache Autoklavierzyklen (ca. 15) sind möglich, dabei kommt es zu einer leichten Braunverfärbung des Materials ohne Qualitätseinbuße. Darüberhinausgehende Autoklavierzyklen sind machbar, allerdings sollte das Spongematerial nicht bröckelig werden, da dann die Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet ist und Krümelreste im Oropharynx verbleiben könnten. Wichtig (auch vor dem Autoklavieren!) ist eine gründliche Reinigung durch mehrfaches Ausdrücken unter fließendem Wasser. Wir empfehlen für die Langlebigkeit des Materials unbedingt das Desinfektionsbad, das beliebig oft angewendet werden kann und labortechnisch auf Bakterien und Viren getestet wurde (siehe genaue Pflegehinweise).

EICKEMEYER®

GERMANY | EltstraÙe 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk

DENMARK | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

NETHERLANDS | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

POLAND | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

CANADA | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca